

Prise en charge de la chaise roulante avec masque, Berlingo

1. Position de sélecteur sur P.
Frein à main automatique




2. Descendre la rampe par le levier à droite




3. Désinfecter les poignées de la chaise roulante

4. Mettre la chaise au bas de la rampe, freiner la chaise

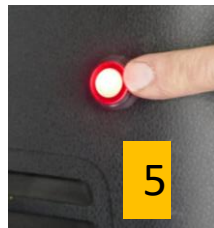


5. Basculer Interrupteur électrique sur le flanc droite, son strident

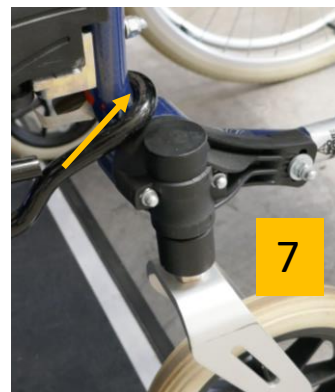


6. Tirer les sangles de fixation avant

7. Mettre les sangles de chaque côté sur l'armature de la chaise

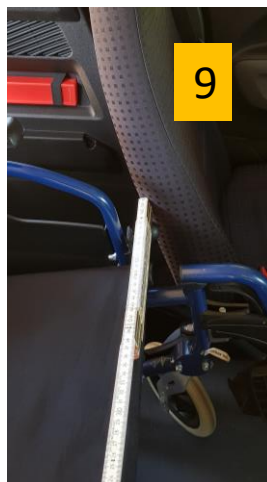

8. Interrupteur à droite déclenché, le son strident s'arrête

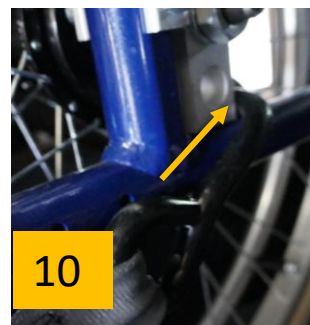


9. Défreiner, Pousser la chaise, jusqu'à l'arrière des sièges arrières. FREINER la chaise

10. Poser les fixations arrières et relier à l'armature chaise près des axes de roues principales

11. Prendre la ceinture de sécurité, (même système que passager normal), ajuster la sangle ventrale et d'épaule (passage près du cou)



12. Monter et verrouiller la rampe, autoverrouillage.

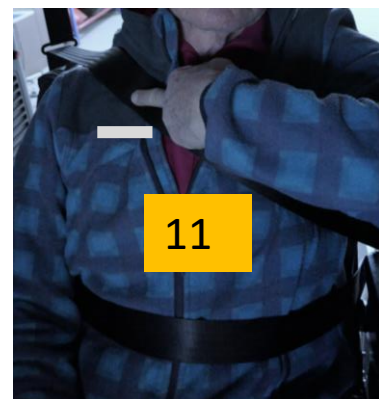

Conduite défensive, attention aux gendarmes couchés et rond-points.

Sortie de la chaise roulante avec masque, Berlingo

1. Position de sélecteur sur P.
Frein à main automatique
2. Descendre la rampe par le levier à droite
3. Déverrouiller la sangle du passager et la ranger à droite
4. Débrayer les fixations arrière par le petit levier rouge sur les blocs et déposer les fixations
5. Basculer l'interrupteur électrique sur le flanc droite, son strident
6. Défreiner et avancer la chaise de 10 cm, puis reculer
7. Contrôler la descente de la chaise; au bas de la rampe, freiner la chaise
8. Enlever les sangles de fixation avant, les accrocher aux bases de la ceinture de sécurité et déclencher le son strident
9. Défreiner la chaise et amener la personne aux soins.
10. Si prise en charge d'une autre personne,
DÉSINFECTER les parties en contact avec la personne précédente.
Rétablir le vhc